

სამედიცინო დანიშნულების საქონელის

გამოყენების ინსტრუქცია

კოლდისეპტი ნანოსილვერი

ყურის წვეთები

სავაჭრო დასახელება

კოლდისეპტი ნანოსილვერი

ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ

არკონა ლაბორატორია სტომატოლოგიური ფარმაცოლოგიის გუგოჟა კალბარჩიკა, ნასუტუვი 99C, 21-025 ნემცე, პოლონეთი

АРКОНА Лаборатория стоматологической фармакологии Гжегожа Калбарчика, Насутув 99C, 21-025 Немце, Польша

დანიშნულება

სამედიცინო გამოყენების საქონელი კოლდისეპტი ნანოსილვერი ყურის წვეთების სახით გამოიყენება გარე სასმენი მილის არხში ჩასაწვეთად ნებისმიერი დაბინძურების შერბილების და მოცილების მიზნით, აგრეთვე ბაქტერიული და გარეგანი სასმენი მილის ანთების საწინააღმდეგო დამხმარე მკურნალობისთვის და სოკოვანი ინფექციები კანის ზედაპირზე დამცავი ბარიერის შექმნისთვის.

შეიცავს ვერცხლისა და სპილენძის ნანონაწილაკებს, რომლებიც ამცირებენ ბაქტერიებისა და სოკოების ზრდას, რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა ეტიოლოგიის გარე სასმენი არხის ანთებას.

გამოყენების პირობები: გამოიყენეთ სისტემატიურად ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად.

არ წარმოადენს სამკურნალო საშუალებას.

ტექნიკური და ფუნქციონალური დახასიათება

პარამეტრის დასახელება	დასახელება
ნაწარმის აღწერილობა და მოწყობილობა	სითხე საწვეთურ-ფლაკონში თავსახურით და პირველი გახსნის კონტროლით
შევსების მოცულობა	15 მლ
შიგთავსის დახასიათება	ერთგვაროვანი სითხე თეთრიდან ოდნავ მოყვითალო ფერის, გამჭვირვალე ან ოდნავ დაბინდული, ხილული გაუხსნელი ნაწილაკების გარეშე
შიგთავსის შემადგენლობა	გლიცერინი, პროპილენგლიკოლი, ნანოკოლოიდური ვერცხლი, ნანოკოლოიდური სპილენძი, გასუფთავებული წყალი

გამოყენების უკუჩვენებები

- ინდივიდუალური აუტანლობა პრეპარატის კომპონენტების მიმართ.
- ტიპური მემბრანის პერფორაცია

სიფრთხილის ზომები

- არ შეიყვანოთ დოზირების საწვეთური ყურის არხში ძალიან ღრმად;

- თავიდან აიცილოთ თვალების და პირის ღრუს ლორწოვან გარსებთან შემთხვევითი კონტაქტი;
- საგანგაშო სიმპტომის შემთხვევაში შეაჩერეთ პროდუქტის გამოყენება;
- ორსულ ქალებსა და 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში სამედიცინო გამოყენების საქონლის გამოყენება რეკომენდებულია ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ.

დოზირების რეჟიმი და გამოყენების მეთოდი

დოზირების რეჟიმი

სამედიცინო გამოყენების საქონელი კოლდისეპტ ნანოსილვერი ყურის წვეთების სახით გამოიყენება 3-ჯერ დღეში და, სულ მცირე, ანთების სიმპტომების გაქრობიდან პირველი 3 დღის განმავლობაში.

გამოყენების მეთოდი

1. ფრთხილად გაათბეთ ფლაკონი (სასურველია ხელებით).
2. თავი დახარეთ მტკივნეული ყურის საპირისპირო მხარეს ან დააწვინეთ გვერდზე მტკივნეული ყურით ზემოდან.
3. ჩაუწვეთეთ 5 წვეთი (თუ ექიმმა არ გირჩიათ განსხვავებული დოზირების რეჟიმი) გარეთა სასმენი არხში და გააჩერეთ პაციენტი ამ მდგომარეობაში 3-5 წუთის განმავლობაში.

გვერდითი მოვლენები, რომლებიც დაკავშირებულია სამედიცინო გამოყენების საქონელის გამოყენებასთან, კომბინირებულ გამოყენებას სხვა სამედიცინო მოწყობილობებთან ან ინდივიდუალურ წამლებთან

გვერდითი მოვლენების შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ჰიპერმგრძნობელობის მქონე პაციენტებს შეიძლება განუვითარდეთ ალერგიის სიმპტომები. ალერგიის სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში შეწყვიტეთ სამედიცინო გამოყენების საქონელის გამოყენება.

გვერდითი მოვლენების ყველა შემთხვევის შესახებ ინფორმაცია, რომლებიც არ არის მითითებული გამოყენების ინსტრუქციაში, გვერდითი რეაქციები, სამედიცინო გამოყენების საქონელის ურთიერთქმედების თავისებურებები, ფაქტები და გარემოებები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის პაციენტის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ამ სამედიცინო მოწყობილობის გამოყენებისას, უნდა გადაეცეს იმ ქვეყნის კომპეტენტურ ორგანოს, სადაც ცხოვრობს პაციენტი.

შენახვის და გამოყენების წესები

ვარგისობის ვადა - 2 წელი.

არ გამოიყენოთ შეფუთვაზე მითითებული ვარგისობის ვადის გასვლის შემდეგ.

ინახება არაუმეტეს 25°C ტემპერატურაზე, მშრალ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

შეფუთვაზე მითითებული სიმბოლოების აღწერა

	ვარგისია:
	სერია:
	მიმართეთ გამოყენების ინსტრუქციას
	ევროპული შესაბამისობის ნიშანი

/ბეჭედდასმულია/